



# Primo

**Środek poprawiający przyczepność dla podściereli Molloplast® B**

**Grupa docelowa:**  
Osoby leczone dentystycznie.  
**Prawidłowy użytkownik:**  
Technik dentystyczny

**Opis produktu**  
Środek poprawiający przyczepność Primo pozwala uzyskać połączenie chemiczne między tworzywem akrylowym a materiałem Molloplast® B. Dotyczy to wyłącznie zastosowania w zębów.

**Procedura:**  
Przed należaniem należy opracować podstawnie zgodnie z instrukcją Molloplast® B.

**Należ 1-2 warstwy środka poprawiającego przyczepność** Primo na całą powierzchnię cyklostycznie i wysuszyć podstawy protetyczne. Po wysuchaniu przez ok. 60-90 minut użyczyć Molloplast® B, a następnie przeprowadzić polimeryzację zgodnie z instrukcją.

**Wskazówki bezpieczeństwa:**  
■ Wykonać przed użyciem zgodnie z instrukcją.

■ Należy zwilżyć środkiem całego powierzchnię kontaktu między akrylem a materiałem Molloplast® B. Po wysuszeniu przez ok. 60-90 minut użyczyć Molloplast® B, a następnie spłomierniowac zgodnie z instrukcją.

■ Wysuszyć zgodnie z instrukcją i użyczyć.

■ Unikać kontaktu z oczami, śluzowymi skórą. W razie przypadkowego kontaktu przekupić wystarczającą ilość bieżącej wody.

■ Nie zlewać do kanalówę.

■ Wysuszyć zgodnie z instrukcją.

■ Wysuszyć zgodnie z instrukcją.